

Gesichtsschild.

Montageanleitung.

Nach der Verwendung können die Einzelteile des Schildes mit Glasreiniger oder Desinfektionsmittel gereinigt werden.

ACHTUNG! Verdünnung ist zur Reinigung nicht geeignet.

Mehr Informationen zum Produkt finden Sie hier:
www.marbach.com/gesichtsschild-montage

deutsch

2020/04-001 | 14.04.2020

Gesichtsschild.

Montageanleitung.

LIEFERUMFANG:

Achtung! Bitte desinfizieren Sie alle Teile vor dem Zusammenbau.

- 1 x Stirnband
- 1 x Schild
- 1 x Verschlussband aus Gummi

OPTIONALE VERWENDUNG:

- 1 x Gummiband (Ø 80 mm)

ANWENDUNGSBEREICH.

In allen Bereichen. Gesichtsschild zur Abschirmung vor Tröpfchen in der Luft.

TIPP.

Zur Schweißabsorption kann ein Tuch mit Hilfe einer Büroklammer am Stirnband befestigt werden.

FIRMENNAME UND VOLLSTÄNDIGE ANSCHRIFT DES HERSTELLERS

Karl Marbach GmbH & Co. KG
Karl-Marbach-Straße 1
74080 Heilbronn
Deutschland
info@marbach.com



Gesichtsschild.

Montageanleitung.

MONTAGEANLEITUNG.

1. Schritt:

Stirnband und Schild zusammenstecken.




2. Schritt:

1. Das Verschlussband aus Gummi von innen durch die äußerste Lasche stecken.
2. Verschlussband anschließend in der U-förmigen Lasche einhängen.



3. Schritt:

Verschlussband auf der anderen Seite durch die rechteckige Lasche stecken. Verschlussband kann individuell eingestellt werden.

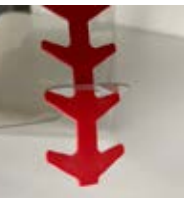

4. Optional:

Optional kann an der Unterseite des Schildes ein Gummiband (Ø 80 mm) befestigt werden. Dadurch umschließt die Schild das Gesicht noch besser.

